

## Sedačky „ROHO“ – návod na použitie

Vážený zákazník,

stali ste sa užívateľom produktu americkej firmy ROHO, ktorý je založený na dokonalom rozložení tlaku ako na predmete plávajúcom vo vode (tzv. „dry floatation“). Tým je trvale zaistené dobré prekrvovanie s dostatočným prívodom kyslíku a živín do týchto častí tela, ktoré sú dlhodobo v styku so sedačkou. Sme presvedčení, že pri správnom užívaní a ošetrovaní Vás tento špičkový výrobok plne uspokojí a zaistí Vám pohodlné sedenie.

### Postup nastavenia:

Odporúčame, aby nastavenie robila iná osoba než užívateľ:

1. Otvorte ventil otočením proti smeru hodinových ručičiek.
2. Pomocou priloženej pumpičky nafúknite sedačku do mierneho prehnutia.
3. Ventil uzavrite otočením v smere hodinových ručičiek a pumpičku odoberte.
4. Sedačku umiestnite na vozík žltou šnúrkou vľavo vpredu a posadte na ňu užívateľa. Dbajte na správny sed a na to, aby opierky na ruky a nohy boli správne nastavené.
5. Z boku vsuňte pod užívateľa ruku dlaňou nahor a prstami nahmatajte výstupok sedacej kosti.
6. Teraz otvorte ventil a vypustite vzduch do tej miery, až kým bude možné ruku ešte voľne vytiahnuť (výstupok sedacej kosti musí byť asi 1,5cm nad základňou). Potom ventil ihneď uzavrite.

**POZOR! Žiadna časť tela sa nesmie dotýkať základne!** Potom by sedačka nemala požadovaný preventívny a terapeutický účinok.

### Manipulácia s poťahom:

Každý štandardný produkt ROHO je vybavený špeciálnym poťahom, ktorý sedačku chráni, uľahčuje údržbu a zabraňuje kízaniu. Poťah je možné prať ručne aj v práčke pri teplote do 60° C.

### Čistenie sedačky ROHO:

Uzavrite ventil (ventily), sedačku opláchnite vlažnou vodou a vyčistite handričkou, hubkou alebo mäkkou kefkou pomocou bežného saponátu alebo mydla. Opláchnite, nechajte odkvapkať a utrite medzi bunkami suchou handrou. Životnosť sedačky znižujú usadeniny piesku alebo iných nečistôt, ktoré môžu vytvoriť akúsi vrstvu, ktorá vedie k mechanickému opotrebovaniu materiálu pri pohybe buniek pri sedení. Na odstránenie nepríjemného pachu je možné sedačku opláchnuť v octovej vode (1 diel octu, 9 dielov vody).

**POZOR! Neperte v práčke, nesušte v sušičke, nepoužívajte roztoky obsahujúce olej, lanolín alebo fenol!**

#### Letmo SK, s.r.o.

Mládežnícka 8, 974 04 Banská Bystrica; tel.: 0800 194 984, e-mail: info@letmo.sk, www.letmo.sk

IČO: 35 890 142; DIČ: SK2021882280


Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., číslo účtu: 2920914648/1100, IBAN: SK3811000000002920914648

Spoločnosť je registrovaná v OR Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka 9664/S

## **Návod na použitie lepiacej sady ROHO:**

### **Súprava obsahuje:**

- samolepiace záplaty – 3ks
- liehové obrúsky – 3ks

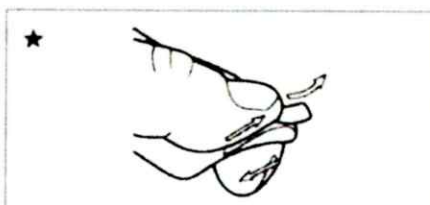

### **Nájdenie miesta úniku:**

1. Ak začne sedačka ROHO sfukovať, nafúknite ju až do mierneho prehnutia, potom uzavrite všetky ventily a ponorte do vody. Miesto úniku si označte.

### **Príprava miesta úniku pre opravu:**

2. Po dôkladnom vysušení očistite toto miesto priloženým liehovým obrúskom. Je veľmi dôležité, aby miesto pre aplikáciu záplaty bolo dokonale čisté a suché.

### **Aplikácia záplaty:**

3. Samolepiacu záplatu opatrne odlepte, uchopte (viď obrázok) a pevne pritlačte. **VAROVANIE:** nedotýkajte sa záplaty na samolepiacej strane, znížite tým jej príľnavosť.
4. Ak sa jedná o nepatrnú trhlinku, stačí odstrihnúť menšiu časť záplaty (aj s ochrannou fóliou, tú odstrániť až tesne pred aplikáciou). Ak je miesto úniku v päte bunky, odstrihnite si príslušný tvar podľa potreby.
5. Po prilepení záplaty čakajte 5 minút pred opätovným nafúknutím podložky, po tejto dobe je možné ihneď sedačku používať.

### **Distribútor na Slovensku:**

Letmo SK, s.r.o.  
Mládežnícka 8  
Banská Bystrica  
97404  
Tel.: 0800 194 984  
E-mail: [info@letmo.sk](mailto:info@letmo.sk)  
[www.letmo.sk](http://www.letmo.sk)