

SK

Príručka pre prevádzku a údržbu

free OK 1.0

PowerWheelchair HOCKEY





SUMMARY

1	VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE.....	1
1.1	Účel a obsah	1
1.2	Výrobca	1
1.3	Uloženie používateľskej príručky.....	1
1.4	Použité symboly	1
1.5	Osobné ochranné prostriedky	2
1.6	Slovník použitej terminológie	2
1.7	Žiadosť o pomoc.....	3
1.8	Likvidácia	3
1.9	Označovanie	3
2	UPOZORNENIA	3
2.1	Všeobecné upozornenia.....	3
2.2	Osobitné upozornenia.....	4
3	POPIS PRODUKTU.....	4
3.1	Zamýšľané použitie	4
3.2	Označovanie údajov	4
3.3	Technické špecifikácie	5
3.4	Podmienky prostredia na skladovanie a prepravu	5
3.5	Podmienky prostredia pre prevádzku.....	6
4	NÁVOD NA OBSLUHU	6
4.1	Preprava a skladovanie	6
4.2	Príprava	6
5	POUŽÍVAJTE	7
5.1	Všeobecný pohľad a komponenty	7
5.2	Ovládače riadenia.....	7
5.3	Úpravy	8
5.3.1	Nastavenie výšky laktovej opierky	8
5.3.2	Poloha joysticku	8
5.3.3	Nastavenie výšky a šírky operadla	9
5.5.4	Sklon a hĺbka sedadla	9
5.5.5	Poloha sedadla	10
5.5.6	Šírka sedadla.....	10
5.4	Funkcie	11

5.4.1	Deaktivácia automatických bŕzd	11
5.4.2	Chladiaci systém.....	
5.5	Spracovanie	12
5.5.1	Predbežné kontroly	12
6	POSTUPY SPRÁVNEHO POUŽÍVANIA.....	12
7	ÚDRŽBA A ČISTENIE.....	12
7.1	Všeobecné čistenie.....	12
7.2	Čistenie kovových častí	12
7.3	Čistenie plastových dielov	13
7.4	Čistenie kolies.....	13
7.5	Údržba	13
7.5.1	Bežná údržba	13
7.5.2	Pravidelný audit.....	14
7.5.3	Mimoriadna údržba	14
8	NEPRÍJEMNOSTI A NÁPRAVNÉ OPATRENIA	14
9	ZÁRUKA	15

POZNÁMKA

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Free2 Italia S.r.l. neustále pracuje na zdokonaľovaní všetkých typov a modelov predávaných výrobkov, a preto sa spoliehame na vaše pochopenie, ak si vyhradíme právo kedykoľvek vykonať zmeny v dodávke vo forme, vybavení, nastavení a technike s ohľadom na to, čo je tu dohodnuté.

1 INFORMÁCIE VŠEOBECNÉ

1.1 Účel a obsah

Tento návod na použitie je určený pre Powerwheelchair Hockey OK 1.0 a jeho cieľom je poskytnúť všetky potrebné informácie, aby používateľ a jeho asistent mohli toto zariadenie správne a bezpečne používať. Tento dokument poskytuje návod na nastavenie, prevádzku a údržbu.

1.2 Výrobca

Free2 Italia s.r.l. via fratelli Carli 69, 50065 Pontassieve (FI) Tel. +390558364442 fax +390558364442 e-mail info@free2.it

1.3 Zachovanie manuálu

Tento návod na použitie musí byť po celú dobu používania zariadenia uložený v blízkosti výrobku, pokiaľ možno vo vhodnom obale a predovšetkým mimo akéhokoľvek prvku alebo látky, ktorá by mohla narušiť jeho dokonalú čitateľnosť.

1.4 Používané symboly

Piktogram

Význam



Všeobecné a/alebo osobitné upozornenia



Pozri návod na použitie



Výrobok spĺňa požiadavky nariadenia o zdravotníckych pomôckach (EÚ) 2017/745



Symbol používaný na označenie informácií osobitného významu v príručke. Tieto informácie sa týkajú aj bezpečnosti personálu zapojeného do používania zariadenia



Symbol používaný na označenie všeobecného zákazu



Symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii uvádza, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom, ale musí sa odovzdať na príslušnom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení (smernica 2012/19/EÚ).

1.5 Osobné ochranné prostriedky

Pri práci v blízkosti zariadenia sa musia pri údržbe prísne dodržiavať všeobecné predpisy o prevencii úrazov, preto je dôležité používať osobné ochranné prostriedky (OOP) potrebné pre každú jednotlivú činnosť.

Nižšie sú uvedené osobné ochranné prostriedky, ktoré sa môžu vyžadovať pri rôznych operáciách.



Povinnosť nosiť ochranné alebo izolačné



rukavice Povinnosť nosiť ochranné okuliare



Povinnosť nosiť bezpečnostnú obuv

Oblečenie osôb, ktoré obsluhujú zariadenie alebo vykonávajú jeho údržbu, musí spĺňať bezpečnostné požiadavky. EU Reg. 2016/425 a zákony platné v krajine, v ktorej sa vykonáva.

1.6 Glosár terminológie used

Termín	Definícia
VÝROBCA	Fyzická alebo právnická osoba zodpovedná za návrh, konštrukciu, balenie alebo architektúru a za uvedenie stroja na trh
UŽÍVATEĽ	Osoba poverená používaním spotrebiča
ASISTENT	Osoba určená na pomoc používateľovi pri používaní spotrebiča
TECHNICKÁ ASISTENCIA alebo AUTORIZOVANÝ PERSONÁL	Osoby alebo subjekty zodpovedné výrobcovi, ktoré inštalujú, montujú, udržiavajú alebo opravujú pomôcku
URČENÉ POUŽITIE	Používanie výrobku, procesu alebo služby v súlade so špecifikáciami, pokynmi a informáciami poskytnutými výrobcom. Nezamieňať s bežným používaním. Obe zahŕňajú koncept používania spôsobom určeným výrobcom, ale používanie sa zameriava na medicínske aspekty, zatiaľ čo bežné používanie zahŕňa nielen medicínsky aspekt, ale aj údržba, servis, preprava atď.
NORMÁLNE POUŽÍVANIE	Používanie zariadenia podľa pokynov výrobcu: prevádzka, nastavenie a údržba.
ODŮVODNENE PREDVÍDATEĽNÉ ZNEUŽITIE	Rozumne predvídateľné prevádzkové chyby, ktoré by mohli spôsobiť nebezpečenstvo pre používateľa pri prevádzke zariadenia mimo bežného používania.
PRÍSLUŠENSTVO	Prídavná časť určená na použitie spolu so zariadením na: realizáciu zamýšľaného použitia, prispôbenie na špeciálne použitie, zlepšiť jeho výkon alebo umožniť integráciu jeho funkcií s funkciami iného zariadenia.
RIZIKO	Pravdepodobnosť vzniku škody.
ŠKODY	Fyzické zranenie alebo poškodenie zdravia osôb, zvierat, majetku a/alebo životného prostredia.
NEBEZPEČENSTVO	Potenciálny zdroj poškodenia.
BEŽNÁ ÚDRŽBA	Pravidelné operácie na kontrolu správneho fungovania (napr. čistenie) určené používateľovi, asistentovi alebo výrobcovi.
MIMORIADNA ÚDRŽBA	Operácie potrebné na prevenciu alebo odstránenie porúch, ktoré môžu ohroziť prevádzku zariadenia. Tieto operácie sú určené pre technickú podporu výrobcu alebo pre personál poverený výrobcom.

1.7 Žiadosť o pomoc na

Akkoľvek informácie týkajúce sa návodu, používania, údržby, inštalácie alebo vrátenia získate od oddelenia služieb zákazníkom spoločnosti Free2 Italia s.r.l., e-mailom na [adrese info@free2.it](mailto:info@free2.it) alebo od miestneho autorizovaného predajcu. Na uľahčenie servisných úkonov vždy uveďte sériové číslo alebo číslo šarže (LOT) na štítku pripevnenom k zariadeniu.

1.8 Likvidácia

Ak zariadenie nie je kontaminované určitými látkami, musí sa odovzdať na príslušnom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení (smernica 2012/19/EÚ), inak sa postupuje podľa platných predpisov o likvidácii.

1.9 Označovanie

Každé zariadenie je vybavené štítkom umiestneným na samotnom zariadení, na ktorom sú uvedené identifikačné údaje výrobcu a výrobku, ako aj označenie CE (pozri časť "Údaje o označovaní"). Tento štítok nesmie byť nikdy odstránený alebo zakrytý.

2 UPOZORNENIA



2.1 Upozornenia všeobecne

- Pred vykonávaním akýchkoľvek prác so zariadením a na ňom (ako je školenie, inštalácia, používanie) si musia používatelia pozorne prečítať pokyny uvedené v tomto dokumente a venovať osobitnú pozornosť príslušným bezpečnostným opatreniam a spôsobom používania, aby sa znížilo riziko zranenia alebo poškodenia osôb a/alebo majetku.
- Ak sú k dispozícii návody na obsluhu a údržbu pre iné zariadenie, ako ste dostali, musíte pred použitím výrobku okamžite kontaktovať výrobcu alebo jeho autorizovaného predajcu.
- V prípade pochybností o správnom výklade pokynov sa obráťte na spoločnosť Free2 Italia s.r.l. alebo na jej autorizovaného miestneho predajcu.
- Pred každým použitím vždy skontrolujte neporušenosť zariadenia. V prípade zistenia anomálií alebo poškodenia, ktoré môžu ovplyvniť funkčnosť a bezpečnosť zariadenia, a teda aj používateľa, je potrebné zariadenie okamžite vyradiť z prevádzky a kontaktovať výrobcu alebo ním poverenú osobu.
- Vykonajte predpísanú údržbu.
- Zaobchádzajte s ním opatrne.
- Je zakázané používať zariadenie na iné účely, ako sú popísané v tejto príručke.
- Zariadenie nepoužívajte, ak ste pod vplyvom alkoholu alebo drog.
- Zariadenie svojvoľne nemeňte ani neupravujte; úpravy by mohli mať za následok nesprávnu činnosť a poškodenie používateľa alebo prípadných záchrancov.
- Do zariadenia sa nesmie žiadnym spôsobom zasahovať (úprava, retušovanie, pridávanie, oprava), inak sa nepreberá žiadna zodpovednosť za nesprávnu prevádzku alebo poškodenie spôsobené samotným zariadením; zaniká aj certifikát CE a záruka na výrobok.
- Zariadenie neukladajte pod iné viac či menej ťažké materiály, ktoré by mohli poškodiť jeho konštrukciu.
- Výrobok skladujte za podmienok uvedených v časti "Environmentálne podmienky skladovania, prepravy a používania", v každom prípade mimo dosahu slnečného žiarenia.

- Zariadenie uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla, zdrojov horenia, horľavých látok a/alebo chemických látok/prípravkov, ktoré môžu zmeniť jeho funkčné a bezpečnostné vlastnosti.
- Zariadenie umiestnite a nastavte tak, aby nebránilo záchranárom v činnosti a v používaní záchranného vybavenia.
- Distribútor alebo koncový používateľ preberá všetku zodpovednosť v súvislosti s nedodržaním pokynov a upozornení uvedených v tomto návode na obsluhu, s následnou povinnosťou odškodniť a/alebo zbaviť spoločnosť Free2 Italia s.r.l. akýchkoľvek možných škodlivých následkov.



2.2 Upozornenia špecifické


- Na vykonanie akejkoľvek operácie používajte len originálne komponenty/náhradné diely a/alebo príslušenstvo alebo tie, ktoré schválila spoločnosť Free2 Italia S.r.l., bez toho, aby došlo k zmenám a úpravám zariadenia; v opačnom prípade spoločnosť Free2 Italia S.r.l. odmieta akúkoľvek zodpovednosť za nesprávnu operáciu a akékoľvek škody spôsobené zariadením osobám a/alebo veciam, čím sa ruší záruka a dodržiavanie smernice 2006/42/ES.
- Dodržiavajte špecifikácie uvedené v tejto publikácii.
- Pred použitím musí používateľ porozumieť funkciám zariadenia
- Dbajte na to, aby ste nepoužívali elektrické ovládacie prvky, keď sa vykonáva nastavenie zariadenia alebo niektorej z jeho súčastí.
- Pred použitím vždy skontrolujte, či časti zariadenia nie sú opotrebované alebo poškodené, a v prípade potreby to oznámte autorizovanému distribútorovi/predajcovi.
- Ak je počas údržby potrebné pracovať na elektrických komponentoch, vždy používajte vhodné osobné ochranné prostriedky, aby ste predišli rizikám alebo zraneniam.
- Nenoste voľné oblečenie ani visiace ozdoby, aby ste zabránili zachyteniu pohyblivých častí.
- Používajte uzavretú obuv a noste dlhé vlasy.
- Pred každým použitím odstráňte prach, oleje, kvapaliny a nečistoty všeobecne.
- Prístroj a všetky jeho súčasti, ak sú umyté, sa musia pred uskladnením nechať úplne vyschnúť.

3 OPIS PRODUKTU

3.1 Ciel'ové miesto použitia

OK 1.0 je zariadenie navrhnuté, skonštruované a testované na praktizovanie športu Powerwheelchair Hockey. NIE JE určené na iné použitie ako na praktizovanie Powerwheelchair Hockey, vozík je navrhnutý a vyrobený len na toto použitie, jeho špeciálne vlastnosti ho robia nevhodným na iné použitie až nebezpečným.

3.2 Údaje a marčatura

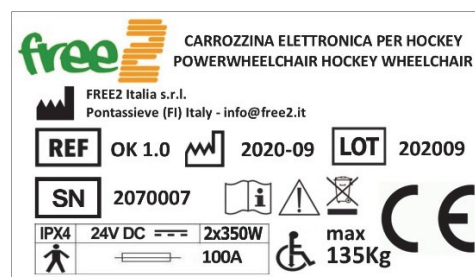


3.3 Funkcie technical


Celková šírka	79 cm
Celková dĺžka	109-119 (vo vzťahu k polohe nárazníka)
Hmotnosť vrátane batérie	75 kg
Šírka sedadla	36-50 cm
Hĺbka sedadla	34-50 cm
Výška operadla	33-45 cm
Motory	2x 350W 24V DC
Batéria	1x 24V 40Ah lítium
Hnacie kolesá	2x 3.50-10
Otočné kolesá	8x 100 mm
Chladenie systému	Dvojitá kombinácia kvapalina-vzduch

3.4 Podmienky prostredia pri skladovaní a preprave


Okolité teplota

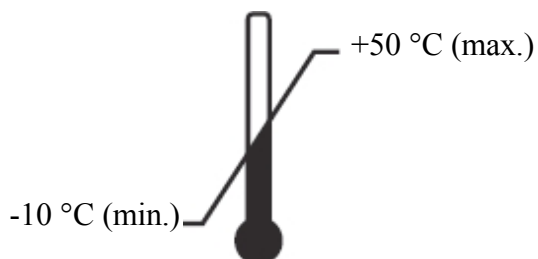

Relatívna
vlhkosť

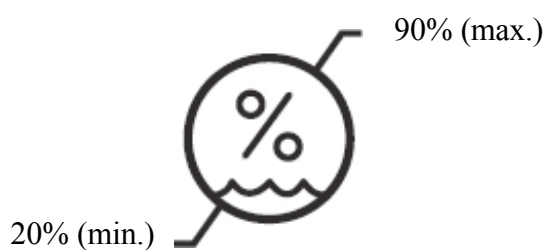

3.5 Podmienky prostredia pre prevádzku

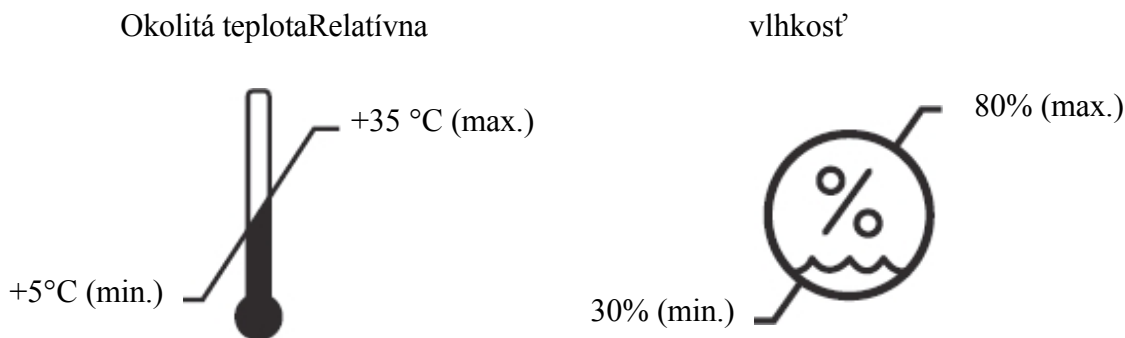

4 NÁVOD NA OBSLUHU

4.1 Preprava a skladovanie

Pred prepravou zariadenia sa uistite, že je riadne zabalené a že ste dbali na to, aby počas prepravy nehrozilo riziko nárazov alebo pádov. Pôvodný obal si uschovajte na účely následnej prepravy a skladovania. Na poškodenie zariadenia spôsobené počas prepravy a manipulácie sa nevzťahuje záruka; za opravu alebo výmenu poškodených častí zodpovedá zákazník.



VAROVANIE: Pred akoukoľvek prepravou zariadenie vypnite.

4.2 Príprava

Po prijatí výrobku:


- Odstráňte obal a viditeľne usporiadajte materiál
- Skontrolujte, či sú v balení všetky diely, ak nie, okamžite kontaktujte spoločnosť Free2 Italy s.r.l. alebo váš miestny autorizovaný predajca
- Pred každým uvedením do prevádzky skontrolujte zariadenie, aby ste zistili poruchy a/alebo poškodenie spôsobené prepravou a/alebo skladovaním. Skontrolujte najmä:
 - Všeobecné funkcie a stav zariadenia
 - Stav čistoty zariadenia

Po skontrolovaní, či je všetko v poriadku, možno zariadenie považovať za pripravené na použitie; v opačnom prípade je potrebné zariadenie okamžite vyradiť z prevádzky a kontaktovať autorizovaný servis.

5 POUŽÍVAJTE

V záujme zabezpečenia správneho používania zariadenia a bezpečnosti používateľa sa odporúča.

5.1 Všeobecné zobrazenie a komponenty

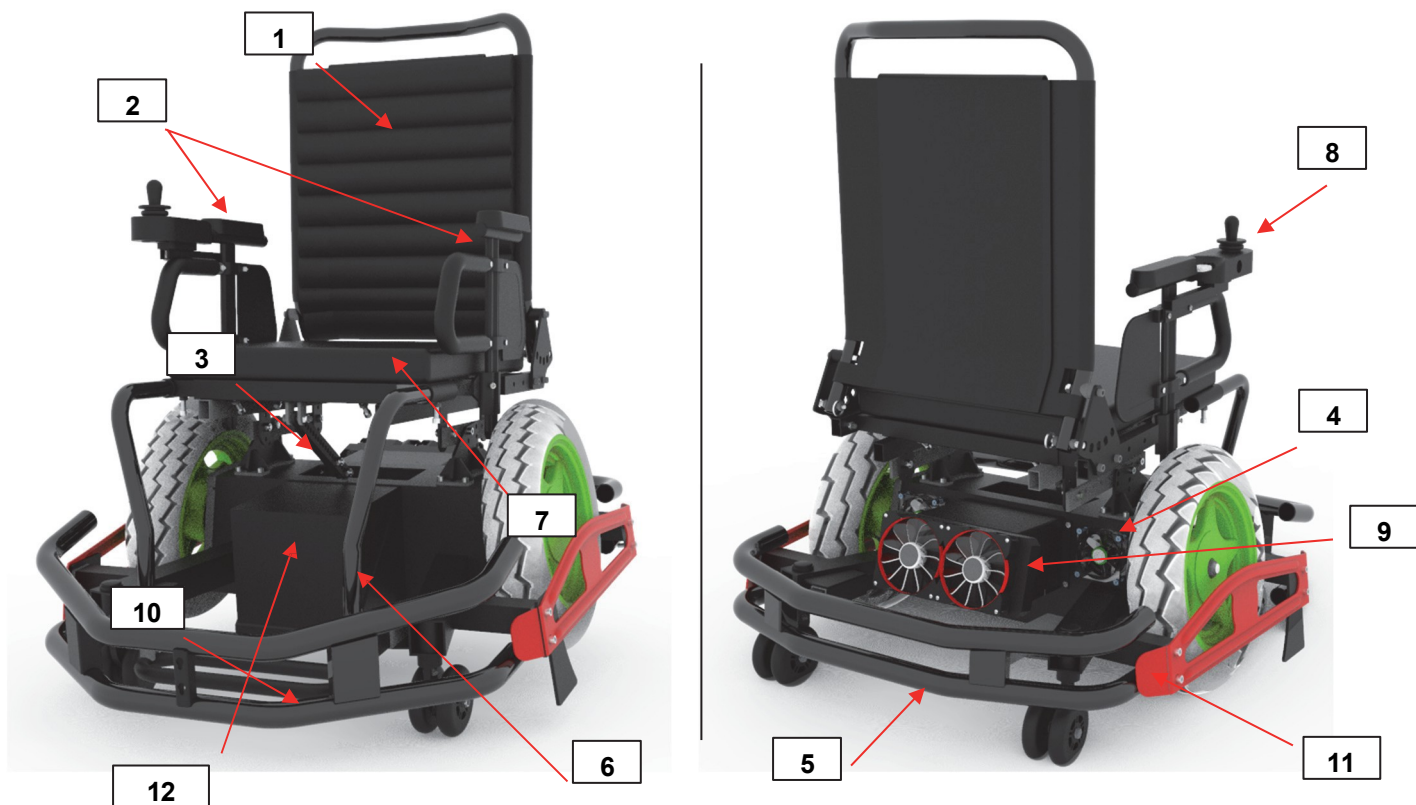

- 1) Opierka chrbta
- 2) Opierka na ruku
- 3) Hlavný rám
- 4) Chladiaci systém s núteným prívodom vzduchu
- 5) Zadný nárazník
- 6) Rám opierky nôh
- 7) Sídlo
- 8) Ovládač joysticku
- 9) Kvapalinový chladiaci systém
- 10) Predný nárazník
- 11) Bočné ochrany
- 12) Skrinka na batérie

5.2 Sprievodca správcom

OK1.0 sa štandardne dodáva s riadiacou jednotkou Dynamic Controls radu LINX (na požiadanie je možné dodať aj iné riadiace jednotky), návod na použitie pre riadiaciu jednotku namontovanú vo vašom OK 1.0 je priložený samostatne.

5.3 Úpravy

5.3.1 Nastavenie výšky opierky rúk

Odskrutkovaním skrutky označenej šípkou A na fotografii nižšie možno opierku odstrániť zo stoličky alebo ju umiestniť do inej výšky a novú výšku nastaviť opätovným upevnením skrutky.


Odskrutkovaním 2 skrutiek označených šípkou B možno bočnú ochranu opierky nastaviť do výškovej polohy.

Tieto nastavenia možno vykonať na oboch opierkach rúk



5.3.2 Poloha joysticku

Ovládač joysticku je možné nastaviť do pozdĺžnej polohy jednoduchým uvoľnením imbusovej skrutky umiestnenej v rúrke označenej šípkou na obrázku nižšie a posunutím ovládača dopredu alebo dozadu, po dosiahnutí správnej polohy bezpečne upevníte tú istú imbusovú skrutku.

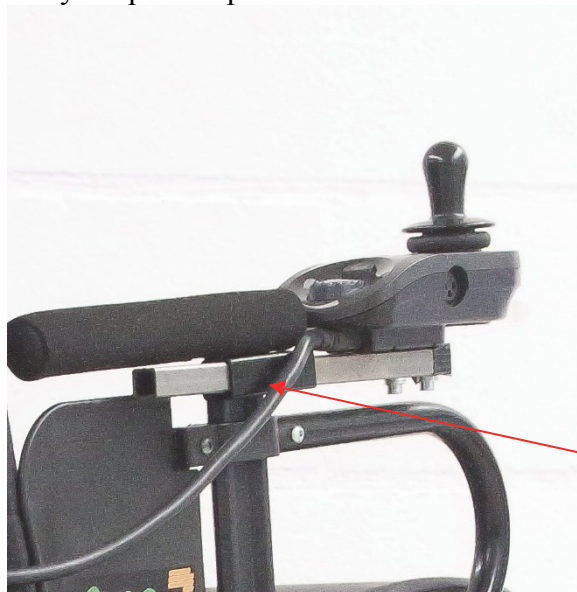

5.3.3 Nastavenie výšky a šírky operadla

Opierku chrbta možno nastaviť na výšku aj na šírku, pričom obidve možnosti sa dajú jednoducho vykonať odstránením krytu a odstránením plastových svoriek, čím sa zmení poloha v rôznych otvoroch, čím sa dosiahnu rôzne veľkosti.

Dbajte na to, aby 2 svorky na bočných rúrkach na nastavenie výšky operadla boli umiestnené v rovnakom otvore, aby ste dosiahli rovnakú veľkosť na oboch stranách.



5.3.4 Sklon a hĺbka sedadla

Tyč znázornená šípkou E na ďalšej fotografii sa dá ľahko dĺžkovo nastaviť uvoľnením 2 skrutiek, ktoré upevňujú hornú časť k spodnej časti, a zmenou polohy upevňovacích otvorov, dlhšia tyč zvýši sklon sedadla, kratšia tyč sklon zníži. Správny sklon pre držanie tela a lepšie ovládanie invalidného vozíka sa musí vybrať podľa potrieb používateľa.

Na nastavenie hĺbky sedadla možno do otvorov označených písmenom C umiestniť dosku označenú písmenom D v inej polohe, na ďalšie zmenšenie hĺbky sedadla možno dosku C namontovať v opačnej polohe, nastavenie uhla zostane rovnaké.




5.3.5 poloha sedadla

V 4 rohoch dosky sedadla je tyč, ako je znázornené šípkou F, s 3 otvormi, pričom zmenou otvoru použitého na spojenie sedadla s tyčou G je možné nastaviť nastavenú výšku. V tyči G sa nachádza rad otvorov, ktorých zmenou otvoru použitého na spojenie s hlavným rámom je možné nastaviť polohu sedadla dopredu/dozadu.



5.3.6 Šírka sedadla

Odstránením sedáku a dosky sedadla je možné dostať sa k 3 obdĺžnikovým rúrkam označeným šípkami H uvoľnením imbusových skrutiek na týchto rúrkach, šírku sedadla je možné nastaviť podľa potrieb používateľa, toto je potrebné vykonať na oboch stranách sedadla. počas nastavovania je potrebné odstrániť hornú sponu na operadle, ako je uvedené v kapitole 5.3.3, a šírku sedadla je potrebné nastaviť spojením otvorov na hornej strane operadla.

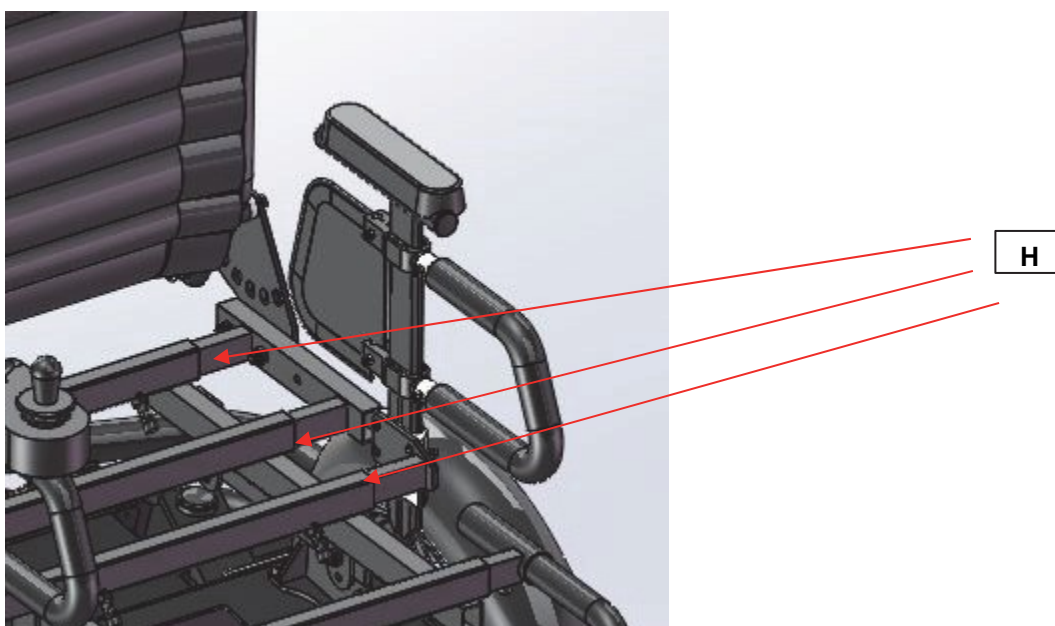

5.4 Funkcie

5.4.1 Deaktivácia brzd automatic

Automatické brzdy na motoroch možno deaktivovať a pohybovať vozíkom ručne, stlačením tlačidla na ľavej strane čiernej skrinky vedľa 2 veľkých ventilátorov kvapalinového chladiaceho systému sa brzdy uvoľnia a vozík sa bude môcť voľne pohybovať, ovládač joysticku, ak je zapnutý, zmení stav na chybový režim, ktorý signalizuje, že brzdy nie sú zapnuté, preto buďte opatrní, opätovným stlačením tlačidla sa brzdy opäť aktivujú, ak chcete zastaviť chybový režim na joysticku, vypnite ho a znova zapnite.



5.4.2 Chladiaci systém

Invalidný vozík OK1.0 je vybavený dvojítm chladiacim systémom:

1. systém kvapalinového chladenia pre napájací modul (2 veľké ventilátory v strede)
2. systém chladenia vzduchu pre motory

Oba sa aktivujú súčasne stlačením tlačidla na pravej strane čiernej skrinky, ktorá sa nachádza vedľa 2 veľkých ventilátorov systému chladenia kvapalinou; keď je systém chladenia aktivovaný, 4 ventilátory sa roztočia a rozsvieti sa farebná kontrolka.

Ak chcete prerušiť, stlačte tlačidlo znova.



5.5 Spracovanie



Pripustné použitie zariadenia je výlučne to, ktoré je popísané v tejto príručke; Pozorne si prečítajte tieto pokyny, aby ste sa oboznámili s funkciami zariadenia.



Akékoľvek úpravy prevádzkových parametrov sú zakázané. Spoločnosť Free2 Italia s.r.l. odmieta akúkoľvek zodpovednosť v prípade zásahu do nastavení. Zmena hodnôt nastavených výrobcom môže ohroziť stabilitu stroja.



Používateľovi je zakázané nosiť šatky alebo iný odev, ktorý by mohol zasahovať do pohyblivých častí zariadenia.

5.5.1 Kontroly predbežné

Pred uvedením zariadenia do prevádzky je potrebné vykonať sériu kontrol a kontrol, aby sa zariadenie používalo správne a aby sa predišlo nehodám.

- Skontrolujte, či zariadenie nebolo poškodené počas vybal'ovania alebo prepravy.
- Zvlášť starostlivo skontrolujte neporušenosť elektrických káblov, batérie a kolies.
- Skontrolujte stav nabitia batérie.



6 POSTUPY SPRÁVNEHO POUŽÍVANIA



Nižšie sú uvedené postupy správania, ktoré je potrebné dodržiavať, aby sa predišlo nebezpečným situáciám vyplývajúcim z nesprávneho používania zariadenia:



- Zabráňte kontaktu elektrických/elektronických častí (vrátane batérie a riadiacej jednotky) s vodou alebo inými kvapalinami.



7 ÚDRŽBA A ČISTENIE



7.1 Čistenie všeobecne

Udržiavanie výrobku v čistote má zásadný význam pre zníženie rizika poranenia alebo poškodenia osôb a/alebo majetku. Aby bolo čistenie jednoduchšie a účinnejšie, odporúča sa vykonávať ho po použití, pred uskladnením zariadenia; tak sa dajú nečistoty ľahšie odstrániť a tiež sa predíde



- akékoľvek korozívne činidlá/látky majú čas a príležitosť pôsobiť na výrobok a zhoršovať jeho kvalitu
- materiálu môže inkrustovať a prilepiť sa na štruktúru zariadenia

Dôkladné čistenie sa odporúča v prípade, že zariadenie prišlo do kontaktu s morskou vodou, a v každom prípade v pravidelných intervaloch nepresahujúcich tri mesiace.

Počas všetkých kontrolných a dezinfekčných operácií musí obsluha používať vhodné osobné ochranné prostriedky (OOP), ako sú rukavice, ochranné okuliare atď.



7.2 Čistenie dielov kov

Natreté kovové časti možno čistiť komerčnými sprejmi pre domácnosť, ktoré neobsahujú alkohol ani rozpúšťadlá, pretože tie môžu zmeniť farbu alebo ju poškodiť. Dodržiavajte pokyny uvedené vo varovaniach. Nepoužívajte vodné trysky ani spreje.



7.3 Čistenie plastových dielov

Na čistenie plastových dielov použite bežne dostupný čistiaci prostriedok na plasty podľa návodu. Vyhnite sa výrobkom obsahujúcim rozpúšťadlá alebo alkohol.

Nepoužívajte vodné trysky ani postrekovače.



7.4 Čistenie kolies

Na čistenie kolies použite bežný čistiaci prostriedok podľa návodu. Vyhnite sa prostriedkom obsahujúcim rozpúšťadlá alebo alkohol.



VAROVANIE: Nebezpečenstvo neúmyselného zachytenia a/alebo rozdrvenia. Pri čistení kolies a pohyblivých častí dbajte na zvýšenú opatrnosť



7.5 Údržba



7.5.1 Údržba bežná



Osoba zodpovedná za bežnú údržbu zariadenia musí spĺňať tieto požiadavky:

- Technické znalosti zariadenia a operácie pravidelnej údržby uvedené v tejto príručke
- znalosť originálnych alebo dodávateľom schválených materiálov, príslušenstva a komponentov/náhradných dielov (ak existujú), aby bolo možné vykonať každú operáciu bez toho, aby došlo k zmenám a úpravám zariadenia

Počas všetkých kontrolných, údržbových a dezinfekčných činností musí obsluha používať vhodné osobné ochranné prostriedky (OOP), ako sú rukavice, ochranné okuliare atď.

OPERÁCIE	PERIODICITA
Skontrolujte funkčnosť ovládacích prvkov.	Pri každom použití
Kontrola stavu kolies	Pri každom použití
Kontrola stavu kovovej konštrukcie (deformácie, nárazy atď.).	Polročne
Kontrola tesnosti upevňovacích skrutiek a funkčnosti zámkov	Polročne
Skontrolujte dotiahnutie príslušenstva (ak je prítomné)	Polročne
Skontrolujte neporušenosť káblov a konektorov elektrického systému.	Ročný
Kontrola čitateľnosti a neporušenosti výrobného štítku.	Ročný

Spoločnosť Free2 Italia S.r.l. odmieta akúkoľvek zodpovednosť za poruchy a akékoľvek škody spôsobené osobám a/alebo veciam používaním zariadení, ktoré nepodliehajú bežnej údržbe, čím strácajú platnosť.

Osoba poverená bežnou údržbou môže identifikovať všetky poškodené diely, ale v prípade výmeny/opravy sa musí obrátiť na výrobcu alebo ním poverené stredisko. Používajte len komponenty/náhradné diely a/alebo príslušenstvo, ktoré sú originálne alebo schválené spoločnosťou Free2 Italia S.r.l., aby ste

akúkoľvek prevádzku bez toho, aby došlo k zmenám a úpravám zariadenia; v opačnom prípade sa nepreberá žiadna zodpovednosť za poruchy a akékoľvek poškodenie spôsobené samotným zariadením, čím sa ruší záruka.

7.5.2 Pravidelná revízia

Plánovaná pravidelná údržba u výrobcu alebo v stredisku autorizovanom výrobcu sa nevyžaduje, ale je predpísané čistenie a kontroly uvedené v príslušných kapitolách "Údržba a čistenie".

7.5.3 Údržba mimoriadna

Mimoriadnu údržbu môže vykonávať len výrobca alebo strediská autorizované výrobcu.

V prípade zásahov, ktoré nevykonáva výrobca, ale autorizované stredisko, upozorňujeme, že je potrebné vyžiadať si správu o vykonanej činnosti. To umožní spoločnosti Free2 Italia S.r.l. aj používateľovi sledovať všetky vykonané zásahy v priebehu času.

8 NEPRÍJEMNOSTI A NÁPRAVNÉ OPATRENIA

Niektoré poruchy môžu časom vzniknúť v dôsledku neustáleho a dlhodobého používania zariadenia; v závislosti od prípadu ich môže odstrániť používateľ alebo výrobca.

Nižšie je uvedená tabuľka s najčastejšími prípadmi porúch, ich pravdepodobnými príčinami a spôsobmi nápravy.

NEVHODNÉ	PRÍČINA	REMEDY
Zariadenie sa nezapne	Nízky stav batérie	Nabíjanie batérie
	Iné príčiny	Kontaktujte výrobcu
Zariadenie nereaguje na príkazy	Porucha elektrického systému	Kontaktujte výrobcu
	Iné príčiny	Kontaktujte výrobcu
Zariadenie je hlučné	Pneumatiky sú vypustené	Nafukovanie pneumatík
	Iné príčiny	Kontaktujte výrobcu
Nabíjačka sa nezapína	Iné príčiny	Skontrolujte pripojenie zástrčky.
		Kontrola údajov o napájaní
		Kontaktujte výrobcu
Batéria sa nedobíja	Vyčerpaná batéria	Výmena batérie
	Iné príčiny	Kontaktujte výrobcu
Zariadenie nepokračuje priamo	Tlak v pneumatike (pneumatikách) nie je správny	Nahustite pneumatiku(y)
	Iné príčiny	Kontaktujte výrobcu
Ovládanie zariadenia nie je jednoduché	Tlak v pneumatike (pneumatikách) nie je správny	Nahustite pneumatiku(y)
	Obal(y) je(sú) veľmi opotrebovaný(é)	Vymeňte kryt(y)

9 ZÁRUKA



Na výrobok sa vzťahuje zákonná záruka 24 mesiacov od dátumu dodania na akúkoľvek výrobnú chybu (zákon č. 24/2002 a smernica 1999/44/ES).

Počas záručnej doby hradí údržbu zariadenia v plnom rozsahu výrobca, ak sa zistí, že ide o výrobnú chybu.

Náklady na dopravu a balenie pri akejkoľvek preprave výrobku v záruke znáša predajca alebo výrobca.

Záruka sa nevzťahuje na diely, ktoré podliehajú opotrebovaniu vzhľadom na ich povahu a účel (napr.: batéria atď.). Záruka sa nevzťahuje na:

Poškodenie spôsobené nesprávnym používaním alebo používaním iným, ako je uvedené v tejto príručke. Poškodenie v dôsledku nesprávnej inštalácie zo strany zákazníka.

Poškodenie spôsobené úpravami, opravami alebo zásahmi neoprávnených osôb. Náhradné diely sú k dispozícii minimálne 5 rokov.

V prípade, že zákazník zistí akékoľvek problémy s výrobkom, musí o tom bezodkladne informovať spoločnosť Free2 Italia S.r.l. alebo jej autorizovaného predajcu vyplnením príslušného formulára na nahlásenie poruchy/defektu, pričom uvedie presné informácie o zistenej poruche a odkazy na výrobný štítok pripevnený na výrobku. Klient po dohode so spoločnosťou Free2 Italia S.r.l. alebo jej autorizovaným predajcom zašle výrobok na záručnú opravu.

Počas záručnej lehoty sa uskutoční technický zásah u výrobcu, ktorý tiež skontroluje, či technický problém vyplýva z výrobnéj chyby alebo z iných príčin.

Tento návod si musí majiteľ ponechať a musí ho priložiť k spotrebiču pri uplatňovaní záruky.

Free2 Italia S.r.l
Via fratelli Carli 69
50065 Pontassieve (FI)
Tel. 055 8364442 Fax 055 8364442
E-mail info@free2.it

© Copyright Free2 Italia S.r.l.

Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tohto dokumentu sa nesmie kopírovať, reprodukovat' ani prekladať do iného jazyka bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Free2 Italia S.r.l.